

# GOUTTES BLEUES MODRÉ KAPKY

**Sterilní hydratační  
oční roztok**

**Zklidní oči a prozáří pohled**

## Co je to únava očí?



Únava očí neboli astenopie se může vyskytnout po intenzivní nebo dlouhotrvající práci, při které se namáhají oči. Únava očí má mnoho symptomů: štípání, pálení, svědění, zarudnutí, úpornou bolest a bolesti hlavy na konci dne. Přípravek OPTICALM **Modré kapky** lze použít pro úlevu od těchto pocitů únavy očí prostřednictvím jeho mechanického účinku. Přípravek hydratuje rohovku a zmírňuje zarudnutí oka.

OPTICALM **Modré kapky**, přípravek bohatý na destilovaný výtažek z chrpy, komonice, bezu černého, heřmánku a vilínu, zmírňuje příznaky únavy očí a Vaše oči se tak opět rozzáří.

## Pokyny pro použití:

Otevírání lahvičky:

- 1 Odtrhněte bezpečnostní poutko
- 2 Sejměte bílé víčko
- 3 Držte lahvičku ve svislé poloze
- 4 Stiskněte kapátko

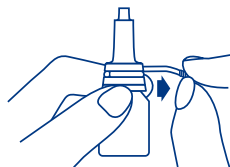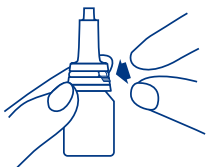

## Doporučení pro použití:

Před použitím si umyjte ruce. Otevřete oční víčko tak, abyste zcela odkryli zorničku a kápněte jednu nebo dvě kapky do koutku oka. Dávejte pozor, abyste se hrotem kapátka nedotkli očí. Před použitím OPTICALM **Modré kapky** se doporučuje chránit si oblečení.

## Bezpečnostní opatření pro uživatele:

Tento výrobek nesmí používat osoby do 15 let. Obsah spotřebujte do 28 dnů od otevření. Z hygienických důvodů je každá lahvička určená k individuálnímu použití a neměli byste ji půjčovat jiným lidem. Pokyny pro uživatele kontaktních čoček: před použitím vyjměte kontaktní čočky, nakapte, počkejte 15 minut a poté, čočky. Nepoužívejte denně po dobu delší než jeden měsíc bez odborného dohledu svého lékaře. Pokud příznaky únavy očí přetrvávají, vyhledejte svého lékaře.

V případě předávkování vypláchněte oko čistou vodou. Výrobek skladujte v originálním balení spolu s příbalovým letákem při pokojové teplotě a v temnu.

## Kontraindikace:

Výrobek nepoužívejte, je-li jeho obal poškozen. Nepoužívejte v případě alergie na jakoukoliv ze složek.

Nepoužívejte po operaci oka bez doporučení lékaře.

OPTICALM **Modré kapky** léčí pouze symptomy suchých očí, avšak nemohou vyléčit onemocnění samotné.

Bez doporučení lékaře nepoužívejte přípravek spolu s jinými oftalmologickými výrobky.



Před použitím přípravku si přečtete tyto pokyny.



Nevystavujte přímému slunci.



Datum spotřeby



Pro použití do očí.



Sterilní filtrace.



Číslo šarže.



Po otevření výrobek spotřebujte do 28 dnů.

OPTICALM **Modré kapky**, sterilní hydratační oční roztok, je zdravotnický prostředek v souladu s požadavky Směrnice Rady 93/42/CEE

Datum poslední revize: březen 2011

DR/NGB/iv Edliée: 2.0

**CE 0120**

**Výrobce:**



Laboratoire Omega Pharma France  
Division des dispositifs médicaux  
20 rue André Gide – FR – 92321 Châtillon

**Distributor:**

Omega Altermed, a.s.  
Drážní 7,  
627 00 Brno – Česká republika